

Manual de instruções

# Banqueta retangular

**DellaMED**  
**HOSPITALAR**  
Produtos para Saúde

## para banho

**Importante:** leia com atenção as instruções de montagem para cuidado e uso adequado do seu produto.

**Descrição técnica:** desenvolvido em TUBO DE ALUMÍNIO e PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, possibilita comodidade e segurança para as pessoas com limitações de movimento e equilíbrio, durante o banho. Não enferruja e possibilita a melhor regulagem em altura com seus pés ajustáveis.

Prática, leve e com design moderno, pode ser utilizada em outros ambientes.

### Especificações técnicas

Material: alumínio, borracha, polietileno e polipropileno.

Altura ajustável do assento: 37cm a 56cm

Comprimento: 51cm

Largura total: 31cm

Peso máximo: 110kg

Peso da cadeira: 1,8kg

### Inclui:

Assento

2 tubos principais

4 pernas

Parafusos (1 parafuso curto e 4 parafusos longos)

5 arruelas

### Montagem:

- 1 - Conferir todos os componentes da caixa para a montagem e, se houver falta de peças, entrar em contato com a loja onde foi adquirido o produto.
- 2 - Colocar o assento de cabeça para baixo, facilitando a montagem do produto.
- 3 - Pegar a barra dobrada nas pontas e achatada no centro e colocar entre um dos pontos "X". Colocar a outra barra e cruzar com a anterior.
- 4 - Fixar os quatro pontos com parafusos e arruelas e certificar se todos estão firmes.
- 5 - Montar os pés ajustáveis e travar todos na mesma altura.

### Ajustar a altura da perna:

1. Antes de utilizar, ajustar o nível de cada perna, conforme altura desejada. Verificar se todas as pernas estão no mesmo nível de altura, em seguida bloquear as pernas, alinhando os botões nos furos apropriados.
2. Para segurança, certificar se todas as pernas estão adequadamente travadas.

### Precauções:

- Jamais utilizar como escada, correndo riscos de acidentes graves;
- Sentar sempre no centro da banqueta, para sua proteção;
- Utilizar somente em superfícies planas e firmes;
- Conferir todas as peças antes da montagem. Se for constatada qualquer danificação, entre em contato com DELLAMED;
- Certificar todos os botões de ajustes de nível, os testando com cliques, através dos furos da perna;
- Verificar se todas as borrachas estão alinhadas com os pés;
- Todos os pés de borracha devem tocar o chão simultaneamente;
- Não ficar em pé na cadeira.

**Importante:** Todas as pernas da banqueta deverão estar ajustadas na mesma altura. Antes de utilizar, conferir se os parafusos estão todos firmes. Nunca ficar em pé na cadeira, risco de acidente.

**Dica:** Para melhor conservação, higienizar com água ou detergente neutro, utilizar escova, após usar. Não utilizar escova de aço. Não utilizar produtos fortes, como cloro e alvejante, podendo ocasionar alterações químicas, que podem danificar a peça.

Prazo de validade indeterminado

Documento-versão: 0101

Importador Dellamed Comércio de Artigos Hospitalares Eireli

CNPJ: 11.666.105/0001-09 e IE: 029/0519179

Endereço: Rua Flores da Cunha, 2027- Bairro Centro,

CEP: 95020-320, Caxias do Sul – RS

Banqueta retangular para banho

Responsável Técnico: Maria Helena Comerlato

Nº no conselho: CREA SP271758

Registro ANVISA nº: \_\_\_\_\_

AFE ANVISA nº: UL9XW0X3YX06

Atendimento ao consumidor: 0800.604.8008 | sac@dellamed.com.br

